


Posicione o pino distal no colo do 2° metacarpiano com angulação aproximada de 45


Position the pin distal in the lap of the  $2^{\circ}$  metacarpian with approximate of  $45^{\circ}$  angulation.

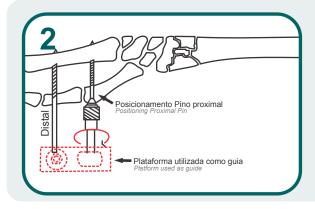

Posicione o pino proximal na base do 2° metacarpiano com angulação aproximada de 45°. Utilizar a plataforma como guia.

Position the pin proximal in the base of the  $2^{\rm o}$  metacarpian with approximate 45° of angulation. Use the platform as guide.



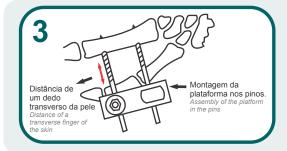


A montagem da plataforma nos pinos do 2º metacarpiano, mantendo uma distância de um dedo transverso da pele

The assembly of the platform in the pins of the 2°metacarpian, maintaining a distance of a transverse finger of the skin.




Na diáfase do rádio, o pino mais distal é colocado na intersecção dos 1/3 médio e distal do rádio. Colocação do segundo pino na diáfase radial

In the diaphysis of the radio, the pin more distal is placed in the intersection of the 1/3 medium and distal of the radio. Placement of the second pin in the radial diaphysis.

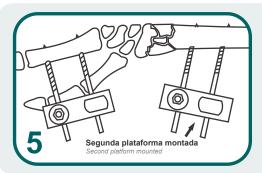

## Montagem da plataforma na diáfase radial

Assembly of the platform in the radial diaphysis.

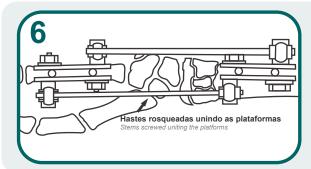

Conexão das hastes rosqueadas (6mm) unindo as plataformas. Faz-se as correções das deformidades e fixam-se as hastes


Connection of the stems screwed (6mm) uniting the platforms. It is made the corrections of the deformities and fixes the stems

## Componentes

Components

Conector (connector) M6 25mm	04
Conector (connector) M6 21mm	04
Porca (nut) M6	16
Barra Rosqueada (thread bar) M6 200	02
Pino de Schanz (schanz pin) 2,5x70mm	03
Pino de Schanz (schanz pin) 3,0x80mm	03
Chave (key) 10/13	01
Plataforma de Punho (fist plataform)	04

REF 50.018

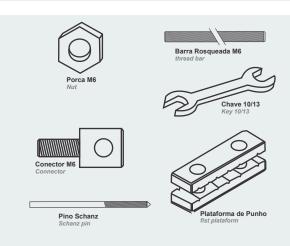



STERILE EO